

ELOFLEX H2

INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
OHJEKIRJA
MANUALE DI ISTRUZIONI
HANDLEIDING VOOR GEBRUIK
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUEL DE L'UTILISATEUR



ELOFLEX

ITALIANO


BENVENUTI NELLA VOSTRA ELOFLEX

Grazie per aver scelto Eloflex come carrozzina elettrica. Siamo lieti che abbiate scelto Eloflex, perché la nostra missione è semplificare la vita quotidiana e migliorare la libertà delle persone con difficoltà motorie. Ci auguriamo che la vostra Eloflex vi permetta di godere di entrambi i vantaggi.

L'utilizzo della nuova carrozzina dovrebbe essere un'esperienza gratificante. Questo manuale contiene informazioni fondamentali sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione. Si consiglia vivamente di leggere l'intero documento prima di utilizzare Eloflex per la prima volta. È inoltre consigliabile esercitarsi nell'uso di Eloflex in uno spazio tranquillo, aperto e pianeggiante prima di avventurarsi in altri ambienti.

Siamo a vostra disposizione per sostenervi nell'utilizzo del vostro Eloflex. Se avete domande o bisogno di assistenza, non esitate a contattarci.

Buona fortuna e buon divertimento con il vostro Eloflex. Guidate con prudenza!

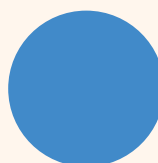

INDICE

Uso previsto	3	Regolare lo schienale / Supporto lombare	12
Svolgimento / Piegare	4	Meccanismo di bloccaggio	13
Smontare / Assemblaggio	5	Dispositivo antiribaltamento / Guida manuale	13
Ricarica	6	Cintura di sicurezza / Trasporto e stoccaggio	14
Installazione del joystick / Piegare il joystick verso il basso	7	Guida	15
Utilizzo del joystick	8	Istruzioni di sicurezza per la guida / Sicurezza	16
Funzioni aggiuntive	9	Istruzioni generali di sicurezza	17
Poggiapiedi	10	Specifiche tecniche	18
Braccioni / Schienale	11		

USO PREVISTO

Classificazione e destinazione d'uso

Le sedie a rotelle elettriche Eloflex sono state sviluppate per le persone che hanno difficoltà a camminare o che non possono camminare affatto, ma che hanno la capacità visiva, fisica e mentale di controllare una sedia a rotelle elettrica.

La carrozzina elettrica Eloflex è sufficientemente compatta e flessibile per l'uso in interni, ma è adatta anche per l'uso all'aperto. Il capitolo "Dati tecnici" sul retro di questo documento contiene informazioni su velocità, raggio di sterzata, autonomia, capacità massima di sollevamento, peso massimo dell'utente, ecc.

Eloflex è testato e approvato secondo la norma EN12184:2014 - Classe B (uso interno ed esterno). Eloflex è anche approvato secondo le norme ISO-7176, IEC60601 e le batterie sono approvate secondo la norma UN38.3.

Le carrozzine elettriche Eloflex soddisfano i requisiti applicabili della direttiva MDR 2017/745.

La valutazione di conformità MDR Classe 1/marcatura CE è stata rilasciata in conformità all'Allegato VIII Capitolo III della MDR 2017/745. Procedura di valutazione della conformità: Allegato II e Allegato III della MDR 2017/745. Il marchio CE decade se si utilizzano componenti o accessori sostitutivi non approvati per questo prodotto.

Esigenze

Lo scopo di una sedia a rotelle elettrica Eloflex è quello di compensare una lesione o una disabilità ed è consigliata nelle seguenti circostanze:

- Se l'utente non è in grado di camminare o ha una capacità di camminare molto limitata, che rende difficile muoversi all'interno della propria abitazione.
- Se è necessario uscire di casa per recarsi in luoghi frequentati abitualmente per le attività quotidiane.
- Quando l'utente ha difficoltà a raggiungere o svolgere lavori o attività a causa di disabilità motorie.
- È consigliabile utilizzare le sedie a rotelle elettriche Eloflex sia all'interno che all'esterno se, a causa di problemi di mobilità, non è possibile utilizzare sedie a rotelle azionate a mano, ma è comunque possibile maneggiare correttamente le sedie a rotelle elettriche.

Gli accessori

Il caricabatterie, i catarifrangenti e una borsa con semplici attrezzi sono contenuti nella borsa di stoccaggio sotto il sedile al momento della consegna.

Utilità

Utilizzate la sedia a rotelle Eloflex solo quando è perfettamente funzionante, altrimenti metterete a rischio voi stessi e gli altri. Il seguente elenco non comprende tutte le situazioni possibili, ma descrive alcune condizioni che possono compromettere l'utilizzabilità della carrozzina:

- Non utilizzare la carrozzina se le batterie sono difettose o deformate.
- Non utilizzare la carrozzina se il motore va a scatti o emette rumori anomali.
- Non utilizzare la carrozzina se il funzionamento dei freni sembra difettoso.
- Se i pneumatici sono usurati, rivolgersi al centro di assistenza o al rivenditore.
- Se si notano danni alla cintura di sicurezza, al bracciolo, al sedile, allo schienale, al joystick o ad altre parti della sedia, rivolgersi al centro di assistenza o al rivenditore.
- Se si notano danni all'impianto elettrico (cavi, batterie, caricabatterie, ecc.), rivolgersi al centro di assistenza o al rivenditore.

Garanzia del produttore

La garanzia Eloflex copre la sostituzione delle parti rotte, a condizione che il danno non sia stato causato dall'utente. La garanzia non copre i danni derivanti da circostanze esterne quali furto, abuso, uso improprio, fulmini o modifiche.

Durata di vita

La durata stimata di un Eloflex è di 5 anni. Tuttavia, la durata del prodotto è fortemente influenzata dalle modalità di utilizzo e manutenzione. Un Eloflex può durare molto più a lungo se viene curato e utilizzato secondo le informazioni fornite in questo documento.

Norme di sicurezza e rischi

L'UTENTE DEVE LEGGERE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E DI GUIDA CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO PRIMA DI UTILIZZARE LE CARROZZINE ELOFLEX.

SVOLGIMENTO E PIEGARE


1. Posizionare la sedia piegata a terra come mostrato di seguito. Rilascia il blocco di trasporto situato sul retro.

Tieni lo schienale e tiralo verso l'alto per aprire la sedia. Con l'altra mano, spingi il sedile verso il basso fino a

sentire un chiaro "clac", che indica che il blocco è inserito.



2. **Importante!** Assicurarsi che la chiusura sia completamente chiusa per bloccare la sedia in posizione aperta.

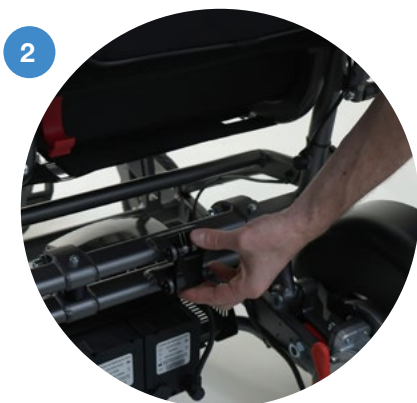


Controllare il blocco prima dell'uso.

1. Premere il pulsante rosso per sbloccare la chiusura principale, come mostrato nell'immagine.
2. Appoggiare una mano sulla parte anteriore del cuscino del sedile.


Con l'altra mano, afferrare la parte superiore dello schienale e piegarlo in avanti. Spingere la sedia come mostrato nella figura. **Punti di pizzico!** Fare attenzione quando si piega."

3. Per mantenere la carrozzina in posizione ripiegata, è possibile inserire un pratico blocco per il trasporto. Ruotare il blocco di trasporto fino a bloccare l'asta opposta.

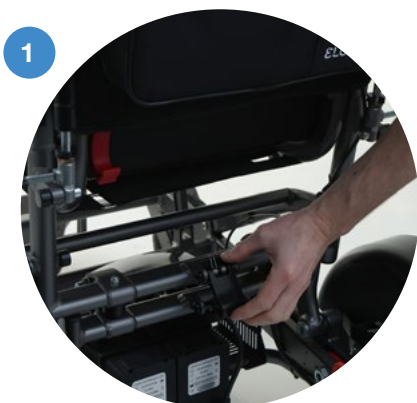


SMONTARE

1. Assicurarsi che la sedia sia completamente piegata e che i braccioli siano abbassati. Ripiegare verso l'alto i dispositivi antiribaltamento. Sollevare quindi la sedia in posizione verticale
2. Premere la leva rossa per rilasciare il meccanismo di blocco.
3. Sollevare la parte superiore direttamente verso l'alto finché può essere completamente separata. Poiché le parti sono pesanti e possono ribaltarsi, maneggiare con cautela quando sono separate in posizione verticale.

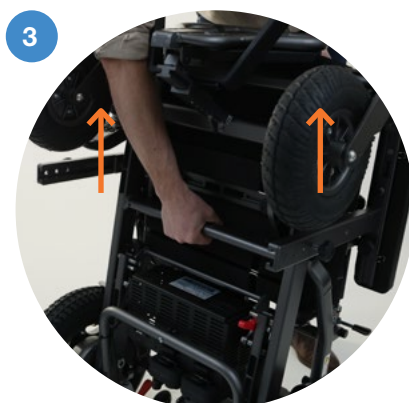

ASSEMBLAGGIO

1. Sollevare la parte superiore e posizionarla correttamente utilizzando le guide sulla parte inferiore. Il meccanismo di blocco si innesta automaticamente, si sente un clic e il connettore è inserito quando la parte superiore è completamente in sede.
2. **Attenzione:** Dopo il rimontaggio, controllare il meccanismo di blocco per assicurarsi che sia correttamente inserito prima dell'uso.
3. Riaprire la sedia. Assicurarsi che il gancio di blocco sia chiuso prima di avviare la sedia a rotelle elettrica e utilizzarla.

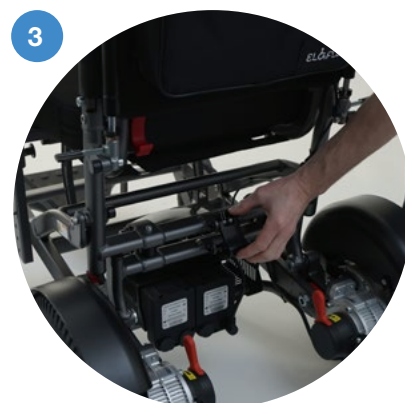

RICARICA

Prima di iniziare

- Caricare il dispositivo Eloflex al momento della consegna.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale fornito con l'Eloflex.
- Il caricabatterie è progettato per essere collegato solo al joystick e non direttamente alle batterie.
- Caricare almeno ogni 3 mesi per evitare danni permanenti alle batterie.

Come caricare

Cercate di caricare il vostro Eloflex dopo ogni corsa o quando l'indicatore della batteria sul joystick scende di tre linee.

Iniziare spegnendo l'Eloflex (tutte le luci sul joystick devono essere spente).

Collegare il caricabatterie alla presa sulla

parte anteriore del joystick. Assicurarsi che i contatti coincidano.

Collegare il cavo di alimentazione del caricabatterie a una presa di corrente.

La carica è indicata da una spia sul caricatore. Una luce rossa indica che la carica è in corso.

Dopo circa tre ore, le batterie sono cariche al 90% e la sedia può essere utilizzata.

Dopo circa 5-8 ore, la spia del caricatore diventa verde, indicando che le batterie sono completamente cariche. Durante la carica, il caricabatterie si riscalda, il che è normale.

Al termine della carica, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente e dalla sedia a rotelle. Non caricare mai senza sorveglianza. Le

batterie possono essere caricate fino a 0 gradi. Quando si caricano a temperature inferiori, le batterie potrebbero non caricarsi completamente.

S Eloflex viene utilizzato a temperature inferiori allo zero, l'autonomia ne risente. Ad esempio, a -10 gradi, l'autonomia può ridursi fino al 50%.


Conservazione a lungo termine

Le batterie possono subire danni permanenti se la tensione scende troppo.

Si consiglia di scollegare le batterie per ridurre al minimo la scarica e di ricaricarle regolarmente (almeno una volta ogni 3 mesi).

Non lasciare mai il caricabatterie permanentemente collegato.



 **La mancata ricarica regolare delle batterie può causare danni permanenti**

INSTALLAZIONE DEL JOYSTICK

1. Montare il joystick assemblando il blocco rapido sul bracciolo con la linguetta (A) rivolta verso l'esterno. Regolare il dado (B) in modo che la linguetta possa chiudersi completamente e mantenere saldamente il joystick in posizione.

Il joystick può essere montato sul lato destro o sinistro utilizzando un adattatore disponibile separatamente.

2. Collegare i connettori dei cavi e ruotarli con attenzione finché i perni non si inseriscono nei fori e le scanalature di entrambi i connettori non coincidono. Quindi, avvitare saldamente i manicotti su ciascun punto di connessione.



Fare attenzione a non danneggiare o piegare i pin del connettore.

PIEGARE IL JOYSTICK VERSO IL BASSO

Il supporto joystick intelligente consente all'utente di abbassare rapidamente il joystick senza rimuoverlo. Questo significa che ci si avvicina al bordo del tavolo, ottenendo una posizione seduta migliore.

1. Sollevare la leva di blocco per sbloccare il joystick.
2. Tirare delicatamente il joystick in avanti. Quindi lasciare che il joystick penda dritto verso il basso.



UTILIZZO DEL JOYSTICK

1. LCD

2. Pulsanti multifunzione

3. Connettore USB

SUGGERIMENTO: utilizzare il connettore USB sotto il joystick per caricare il telefono cellulare.

4. Ingresso caricabatterie

5. Luce

6. Tachimetro

Visualizza la velocità attuale.

7. Impostazione della velocità

Mostra la distanza percorsa e la velocità attuale.

8. Contachilometri parziale/ODO

Visualizza la distanza percorsa

dall'ultima accensione (trip) o la distanza totale del veicolo (ODO).


9. Livello della batteria

Indica l'energia residua delle batterie. Quando sono completamente cariche, tutte le barre sono bianche. Si consiglia di ricaricare quando sono state utilizzate tre barre.



Joystick

Controlla la velocità e la direzione della sedia.

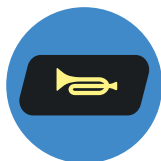

Clacson

Premere per emettere un segnale acustico di attenzione.



Ridurre la velocità

Premere per rallentare la sedia.



Accensione e spegnimento

Premere per accendere o spegnere Eloflex.



Aumenta la velocità

Premere per far andare la sedia più veloce.



Accensione/ spegnimento della luce




Premere per accendere o spegnere la luce.

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Regolazione delle impostazioni

È possibile modificare le impostazioni della poltrona, tra cui la lingua, il volume dell'avvisatore acustico e le unità di misura.

1. Per accedere alle impostazioni, premere il pulsante multifunzione destro. Viene visualizzato un elenco di opzioni.
2. Utilizzare i pulsanti di velocità per scorrere l'elenco delle opzioni verso l'alto e verso il basso.
3. Selezionare una funzione premendo il pulsante multifunzione destro (Invio) o tornare indietro di un passo premendo il pulsante multifunzione sinistro (Ritorno).

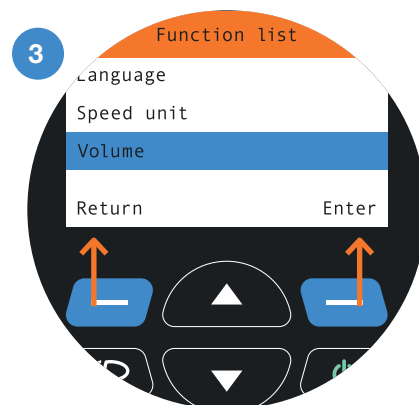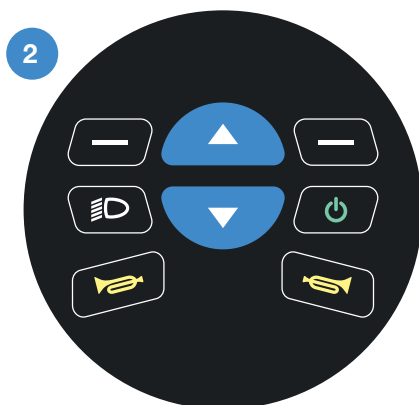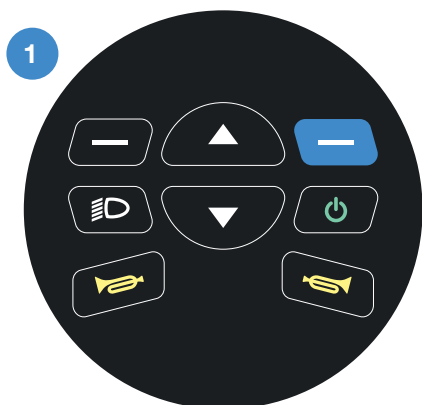

Blocco / Sicurezza bambini

È possibile bloccare elettronicamente l'Eloflex premendo contemporaneamente le frecce su e giù per 3 secondi. Un piccolo simbolo nella parte superiore del display indicherà che il blocco è attivato. (Il joystick deve essere acceso per bloccare/sbloccare).

Porta di ricarica USB

La porta USB può caricare telefoni cellulari, iPad e altri dispositivi portatili.

Fornisce un'alimentazione di 5 V con una corrente di carica determinata dal dispositivo collegato, fino a un massimo di 2,1A.

Avvertenze

Il display è in grado di visualizzare i codici di guasto per indicare gli errori. I codici di errore 1 e 2 indicano che i freni magnetici sono attivi.

Controllo remoto tramite app

La carrozzina Eloflex può essere controllata tramite un'app. Per scaricarla, utilizzare i codici QR riportati di seguito. Se necessario, contattare il concessionario per istruzioni dettagliate. NOTA: il controllo tramite app non deve essere utilizzato come dispositivo di controllo assistito (ad esempio, quando una persona è seduta sulla sedia).

"



POGGIAPIEDI

Ripiegare il poggiatesta


Per facilitare l'ingresso e l'uscita, il poggiatesta può essere ripiegato verso l'alto e verso l'interno, come illustrato di seguito.



1. Stringere le viti di fissaggio **(A)** tenendo il dado.

2. Rimuovere la copertura in plastica nera dai dadi.

3. Fissare nuovamente il poggiatesta nel foro di montaggio alternativo. Se il poggiatesta non resta in posizione sollevata, è possibile regolare la tensione stringendo le viti di fissaggio **(B)**.

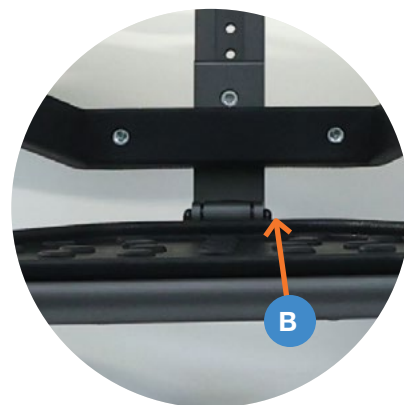

Nota: Montare il supporto per il polpaccio, se non è già installato, fissando la staffa fornita al montante centrale con una vite. Fissare quindi il supporto per il polpaccio alla staffa con due viti.



BRACCIOLI

Regolare i braccioli.

Regolare l'altezza su una delle tre posizioni allentando prima la vite di fissaggio **(A)** e poi tirando il fermo interno **(B)**. Dopo la regolazione, serrare nuovamente la vite per evitare vibrazioni.

Il bracciolo ha due posizioni ripiegate, una quasi completamente abbassata per la chiusura e il trasporto, e una completamente allineata con il sedile per facilitare l'ingresso e l'uscita. Regolare la larghezza con la vite **(C)**.

Regolare il bracciolo orizzontalmente (in avanti o indietro) premendo il piccolo pulsante sotto il bracciolo **(D)** e facendo scorrere il cuscino. Rilasciare il pulsante per bloccarlo in posizione.

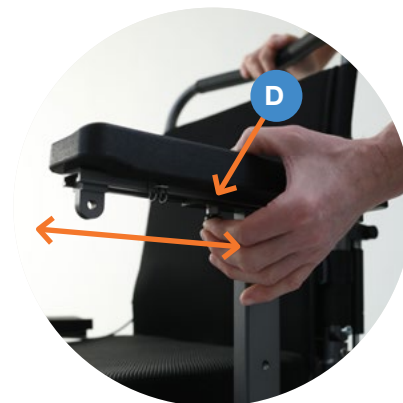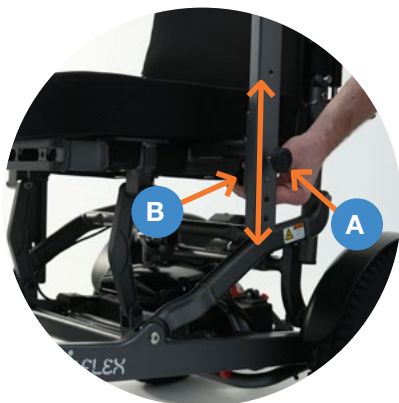

SCHIENALE

Inclinare lo schienale

Per cambiare senza interruzioni l'angolo dello schienale, premi le leve su entrambi i lati. Inclina lo schienale nella posizione desiderata e quindi rilascia le leve per bloccarlo.


Regolare l'altezza.

L'altezza dello schienale si regola allentando le viti **(A)**. In posizione alta, la parte superiore dello schienale può essere utilizzata come maniglia per trasportare la sedia piegata.



REGOLARE LO SCHIENALE

Sollevere il rivestimento dello schienale per ripiegarlo. Stringere le cinghie in velcro per ottenere una posizione di seduta confortevole. Quindi ripiegare il rivestimento e premere leggermente per fissarlo alle strisce in velcro.

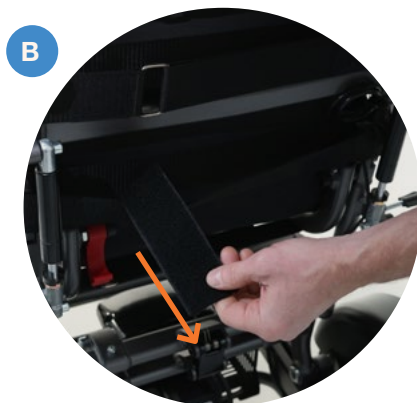



DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO

Il dispositivo antiribaltamento non deve essere regolato, ma può essere ritratto per il trasporto su alcuni modelli. La carrozzina non deve essere utilizzata senza il dispositivo antiribaltamento attivo, poiché ciò comporta il rischio di gravi lesioni. Controllarlo prima di ogni utilizzo.



Rischio di lesioni!
Assicurarsi sempre che il dispositivo antiribaltamento sia attivo.

GUIDA MANUALE

Spegnere la carrozzina con il joystick. Spingere quindi le leve rosse sui motori (vedi figura) per scollegare i freni magnetici. In questa posizione, la sedia può essere fatta rotolare manualmente. Nota! Se l'utente utilizza la sedia senza assistenza, il blocco magnetico della sedia deve essere sempre inserito.



Non spingere le leve rosse con i piedi, ma solo con le mani.


CINTURA DI SICUREZZA

Per una guida sicura, si consiglia di utilizzare sempre la cintura di sicurezza quando si utilizza la sedia.



TRASPORTO E STOCCAGGIO

- Per sollevare la sedia, si consiglia di piegarla prima in posizione orizzontale, poi di sollevarla in posizione verticale e infine di sollevarla.
- Una sedia piegata può essere riposta nel bagaglio di un'auto o in un armadio.
- Durante il trasporto, ripiegare o rimuovere il joystick.
- Se la poltrona non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, assicurarsi che sia conservata correttamente e che le batterie siano caricate periodicamente come indicato nel capitolo "Come si carica". In caso contrario, la sedia potrebbe diventare inutilizzabile.
- La poltrona deve essere conservata in ambienti chiusi, al riparo dal gelo, asciutti e ventilati. Temperatura di stoccaggio 0–30 gradi.
- I cuscini sono sfoderabili e lavabili a 40° C.
- Durante il trasporto in autobus o con mezzi per disabili, l'Eloflex deve essere fissato ai punti di ancoraggio **(1–4)** mostrati nelle immagini sottostanti. **Nota:** Eloflex non è testato né omologato come seggiolino auto. Pertanto non è consentito sedersi sull'Eloflex durante il trasporto in auto.
- In caso di trasporto in aereo, si prega di confermare con la propria compagnia aerea prima della prenotazione e del check-in. Eloflex segue le raccomandazioni della IATA.

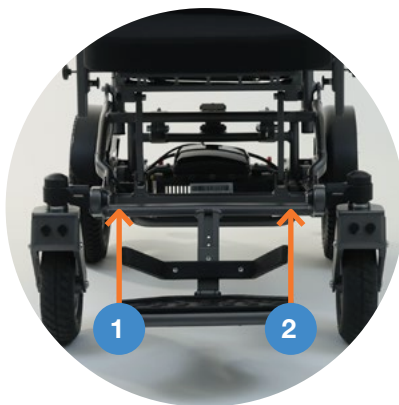

GUIDA

Leggere

L'utente deve leggere queste istruzioni di sicurezza e di guida prima di utilizzare la carrozzina Eloflex.

Pratica

La pratica rende perfetti. Allenatevi a guidare Eloflex insieme a un assistente iniziando su una superficie aperta, preferibilmente all'aperto, prima di utilizzare la sedia a rotelle tra altre persone, in negozi o ristoranti, ecc. Avanzare muovendo lentamente il joystick. Fermarsi rilasciando il joystick.

Invertire

Fare retromarcia muovendo lentamente il joystick all'indietro. Per fermarsi, rilasciare il joystick. Ricordate di guardare sempre all'indietro prima di iniziare la retromarcia per assicurarvi che non ci siano persone o cose in mezzo.

Girare

Fate girare il joystick muovendolo delicatamente di lato. Fare attenzione a non intralciare i lati durante la rotazione.

Girare

Girare mentre si guida muovendo delicatamente il joystick lateralmente nella stessa direzione in cui si vuole girare. Ridurre sempre la velocità quando si gira.

Ostacoli

Esercitarsi a evitare e superare gli

ostacoli. Muovete il joystick lateralmente mentre guidate in avanti per evitare gli ostacoli. Ricordarsi di ridurre la velocità quando ci si avvicina agli ostacoli.

Guida veloce

Guida veloce: Premete il joystick in avanti se volete guidare velocemente. Ricordate di ritirare il joystick e di ridurre la velocità non appena vi sentite insicuri, sia che stiate girando sia che vi stiate avvicinando a un ostacolo svolta o l'avvicinamento a un ostacolo.

Superare gli ostacoli

Avvicinarsi lentamente all'ostacolo e assicurarsi che le ruote anteriori siano nella direzione di marcia. Quindi spostare lentamente il joystick in avanti, piegandosi all'indietro, per superare gli ostacoli Eloflex è testato e approvato per ostacoli fino a un massimo di 6 cm.

Superfici in pendenza

Provate a guidare dritto verso l'alto o verso il basso su una superficie inclinata. Piegatevi leggermente in avanti quando salite e all'indietro quando scendete, per mantenere il centro di gravità. Se possibile, evitate di guidare lateralmente e compensate la pendenza laterale inclinandovi nella direzione opposta. Guidare sempre lentamente sui pendii e tenere presente che la distanza di arresto può essere significativamente maggiore rispetto al terreno pianeggiante. L'angolo

di pendenza massimo consentito per questa carrozzina è di 9 gradi. Anche se la vostra Eloflex è in grado di farlo, evitate di guidare su pendenze superiori all'angolo di prova richiesto per il rischio di gravi lesioni in caso di ribaltamento.

Ascensori

Ricordate di controllare la larghezza della porta dell'ascensore e la velocità di chiusura della porta prima di entrare nell'ascensore. Tenete presente che potreste essere costretti a fare retromarcia se l'ascensore non è abbastanza ampio da permettervi di girarvi.

Guida su strada

Guidare principalmente sui marciapiedi, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili.

Attraversare la carreggiata

Se possibile, scegliete sempre di attraversare la strada sulle strisce pedonali. Prestare attenzione alle auto che si incrociano. Utilizzare la parte smussata del marciapiede, se disponibile. Evitare i cordoli più alti di 6 cm.

Pneumatici

Se la carrozzina è dotata di pneumatici ad aria, controllare regolarmente la pressione a 2,5 bar. In caso di foratura, astenersi dalla guida e rivolgersi al rivenditore o a un'officina specializzata per la riparazione.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA GUIDA

Il ribaltamento della carrozzina comporta il rischio di gravi lesioni.

- Guidare solo in pendenze che non superino l'angolo massimo specificato.
- Utilizzare sempre dispositivi antiribaltamento quando si viaggia con Eloflex.
- La guida in discesa deve essere sempre effettuata a velocità ridotta.
- Evitare le aree a rischio di superfici ghiacciate o scivolose.
- Non cercare mai di salire o scendere le scale con la sedia a rotelle.
- Non superare mai ostacoli di altezza superiore a quella massima consigliata.
- Evitare movimenti rapidi con il joystick e cambi improvvisi di direzione durante la guida.

Rischio di rimanere bloccati in luoghi remoti.

- Un utente con mobilità molto ridotta non dovrebbe percorrere da solo lunghe distanze all'aperto.

Rischio di lesioni se un piede scivola dalla pedana e cade sotto la carrozzina durante la guida.

- Durante la guida, posizionare sempre i piedi al centro della pedana.

Rischio di lesioni in caso di collisione con altri oggetti.

- Attraversare i passaggi stretti alla minima velocità e con la massima attenzione.
- Prestare particolare attenzione quando ci si avvicina o si guida in prossimità di tavoli a causa del rischio di schiacciamento tra il piano del tavolo e il joystick e/o il bracciolo.

Se i dispositivi antiribaltamento vengono rimossi, danneggiati o montati in una posizione diversa da quella standard, la carrozzina rischia di ribaltarsi.

- I dispositivi antiribaltamento devono essere sempre montati quando si utilizza la carrozzina.
- I dispositivi antiribaltamento funzionano solo su

superfici solide. Su superfici morbide come prati e neve, il dispositivo antiribaltamento può perdere la sua efficacia. Pertanto, guidare con estrema cautela su superfici morbide.

Fibra di carbonio

Per i nostri modelli in fibra di carbonio, si prega di notare quanto segue: Questo materiale presenta un eccellente rapporto resistenza/peso, che consente il peso complessivo ridotto. Tuttavia, il materiale è anche più fragile rispetto ad altri materiali come l'alluminio ed è più soggetto a crepe o perforazioni. Pertanto, un prodotto in fibra di carbonio deve essere trattato con maggiore attenzione rispetto ad altri prodotti, e ciò vale anche per la vostra sedia a rotelle Eloflex.



SICUREZZA

Attraversamento dei binari ferroviari

Attraversate sempre i binari ferroviari in linea retta, mai in obliquo. Non attraversate mai i binari da soli, ma sempre con qualcuno che possa aiutarvi.

Spigoli vivi

Fate attenzione quando guidate su pendii ripidi, perché la sedia potrebbe rompersi. Eloflex è testato e approvato per pendenze con un massimo di 9 gradi. Avete sempre con sé qualcuno che possa aiutarvi.

Bordi alti

Fate attenzione quando salite o scendete da un bordo. Eloflex è testato e approvato per bordi fino a un massimo di 6 cm. È necessario avere sempre con sé qualcuno in grado di aiutarlo.

Trasferimento

Si consiglia di avere sempre con sé qualcuno che possa aiutarvi nei trasferimenti da e verso il vostro Eloflex. Spegnerne sempre l'alimentazione prima di iniziare il movimento. Sollevare sempre i braccioli e il poggiatesta prima di spostarsi per facilitare la salita e la discesa dalla poltrona.

Non riparare da soli

Non cercare mai di riparare da soli una sedia a rotelle rotta. Se si tenta di riparare la sedia da soli, la garanzia non è valida. Rivolgersi sempre a Eloflex o al negozio o al centro di assistenza che ha venduto/prescritto la sedia. Non modificare mai la carrozzina da soli.

Nessun giocattolo

Non permettere mai a bambini che non usano abitualmente una sedia a rotelle di sedersi o di usare Eloflex.

Pulizia

Non pulire mai Eloflex con acqua corrente. Pulirlo solo con un panno umido. Se Eloflex è lento a ripiegarsi, è possibile lubrificare le giunzioni con olio o spray al silicone.

Attenzione al calore

Non lasciate mai Eloflex alla luce diretta del sole, vicino a una fonte di calore o a un fuoco aperto. Le batterie potrebbero danneggiarsi e alcune superfici potrebbero surriscaldarsi a tal punto da rischiare di ferirsi. È possibile utilizzare Eloflex da -10 gradi a +45 gradi. A basse temperature l'autonomia di guida sarà compromessa. La carrozzina è resistente all'accensione secondo la norma EN 12184.

Conservazione

Tenere Eloflex fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato. La sedia deve essere conservata in ambienti chiusi, al riparo dal gelo, asciutti e ventilati. Temperatura di stoccaggio 0-30°C.

Il caricabatterie

Il caricabatterie non deve mai essere coperto quando viene utilizzato per caricare l'Eloflex.

Il caricabatterie si surriscalda e c'è il rischio di incidenti o lesioni.

Batterie

Non conservare mai le batterie alla luce diretta del sole o in un luogo che possa raggiungere temperature inferiori allo zero. Le batterie devono essere conservate in un luogo asciutto e ventilato. In caso di smaltimento le batterie devono essere riciclate secondo i requisiti nazionali/locali. Come per tutti i prodotti a batteria, l'autonomia di guida diminuisce con il tempo, anche durante il periodo di garanzia e la durata del prodotto.

Utilizzo

La carrozzina elettrica Eloflex è stata progettata per soddisfare diverse esigenze. La decisione in merito alla sua idoneità per l'utente è presa congiuntamente dal coordinatore o dal rivenditore e dall'utente. Eloflex non si assume alcuna responsabilità se la carrozzina non è adattata alle esigenze dell'utente.

Modifiche

Eloflex deve essere utilizzato principalmente nella sua configurazione standard. Eventuali modifiche o regolazioni devono essere eseguite esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato o da Eloflex. I danni o i malfunzionamenti causati da modifiche non conformi alle istruzioni per l'uso o da una manutenzione inadeguata non sono coperti dalla garanzia.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Se la carrozzina viene utilizzata per scopi diversi da quelli descritti nel presente documento, sussiste il rischio di lesioni personali.

- Utilizzare la sedia a rotelle solo secondo le istruzioni contenute nel presente manuale (vedere sopra, capitolo "Classificazione del tipo e uso previsto").
- Non utilizzare mai la sedia a rotelle mentre è trasportata in un altro veicolo (auto/bus).

Esiste il rischio di lesioni personali se la sedia a rotelle viene utilizzata con una capacità di guida ridotta.

- Non utilizzare la sedia a rotelle quando le proprie capacità di guida sono compromesse a causa, ad esempio, di malattie, farmaci o alcol.

C'è il rischio di lesioni se la sedia a rotelle viene spostata involontariamente.

- Spegnerla la sedia a rotelle prima di salire e scendere o se c'è il rischio che voi, un'altra persona o un oggetto possano entrare in contatto con il joystick.
- Quando i motori sono disinnestati, i freni non funzionano. Pertanto, la carrozzina deve essere spinta solo su terreni pianeggianti e mai su pendii. Non lasciare mai la carrozzina all'interno o in prossimità di pendii con i motori disinseriti.

Esiste il rischio di lesioni personali se la carrozzina viene spenta durante la marcia, ad esempio con il pulsante di accensione/ spegnimento o strappando un cavo, poiché si

arresta con un forte scatto.

- Rilasciare il joystick quando si frena in caso di emergenza. La carrozzina si arresta automaticamente.

Esiste il rischio di lesioni dovute a cadute dalla carrozzina.

- Non spostarsi in avanti, non piegarsi in avanti tra le ginocchia e non sporgersi dal bordo della carrozzina, ad esempio per raggiungere degli oggetti.
- Si raccomanda di utilizzare sempre la cintura di sicurezza e di regolarla nuovamente prima di ogni viaggio.
- Durante il trasferimento tra sedili/veicoli, avvicinarsi il più possibile alla nuova posizione per ridurre al minimo lo spazio e il rischio di ribaltamento della carrozzina.

Il superamento del carico massimo consentito comporta il rischio di lesioni personali.

- Rispettare il carico massimo consentito (vedere il capitolo ""Dati tecnici"" sul retro di questo documento).
- La sedia a rotelle può essere utilizzata da una sola persona. Non utilizzare mai la carrozzina per trasportare più di una persona alla volta.

Il rischio di lesioni personali e di danni alla carrozzina sussiste se il blocco si sblocca quando la piegatura non è correttamente bloccata durante l'utilizzo della carrozzina.

- Se il blocco della sedia a rotelle non è scattato correttamente in posizione, la sedia può crollare

improvvisamente durante l'uso, con il rischio di cadere dalla sedia.

- Assicurarsi sempre che il gancio di bloccaggio sia in posizione corretta prima di utilizzare la carrozzina.
- Quando si ripiega la sedia a rotelle c'è il rischio di lesioni personali e danni da schiacciamento.
- Ripiegare e sollevare sempre la carrozzina come descritto nelle istruzioni per l'uso.
- Prestare attenzione affinché nulla o quasi venga schiacciato durante le operazioni di ripiegamento e dispiegamento.

Se la sedia a rotelle viene utilizzata in ambienti umidi, sussiste il rischio di lesioni personali e di danni alla carrozzina.

- La sedia a rotelle non deve essere utilizzata durante la pioggia.
- La sedia a rotelle non deve essere utilizzata durante il bagno.
- Evitare di guidare in condizioni di pioggia per periodi prolungati.

EMC

- Esiste il rischio che la carrozzina possa disturbare o essere disturbata da apparecchiature a causa dei campi elettromagnetici. Ciò potrebbe influire sui comandi della carrozzina.
- Questo dispositivo è dotato di trasmettitore Bluetooth. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore."

SPECIFICHE TECNICHE H2

PESO NETTO Senza batterie	19 + 23 kg	INCLINAZIONE MASSIMA Statico / dinamico	9° / 6°
PESO TOTALE Con batterie incluse	46 kg	OSTACOLO MASSIMO	5 cm
VELOCITÀ	6,5 km/h	RUOTE 2,5 bar	9" anteriori (pneumatiche) 13" posteriori (pneumatiche)
AUTONOMIA	30 km*	SEDILE A x L x P	58 x 48-60 x 47
DURATA Per carica	5 h	PESO MASSIMO DELL'UTENTE	190 kg
MOTORE	2 x motore brushless ad alta potenza	JOYSTICK	Montaggio a destra o a sinistra
POTENZA DEL MOTORE	2 x 350 W	CUSCINO	Rivestimento staccabile e rimovibile
BATTERIA +1 posto extra	2 x ioni di litio 10 Ah / 24 V (240 Wh)	SCHIENALE	Angolo regolabile 8-30°
PESO DELLA BATTERIA	1,8 kg	DIMENSIONI A x L x P	102-112x 65 x 125 cm
TEMPO DI RICARICA	3 h	DIMENSIONI QUANDO RIPIEGATA A x L x P	54 x 65 x 98 (93**) cm
RAGGIO DI STERZATA	94 cm	GARANZIA	2 anni

* Distanza in condizioni ottimali e influenzata dalla temperatura, dallo stile di guida, dall'altitudine e dalle condizioni della batteria, ecc. Per un'autonomia estesa e/o una maggiore capacità di peso dell'utente, consigliamo l'uso di tre batterie.

** Supporto polpaccio rimosso.

© Copyright Eloflex

Questo documento contiene informazioni protette da copyright e non può essere copiato o riprodotto in tutto o in parte senza l'autorizzazione scritta di Eloflex. Eloflex non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici contenuti nel presente documento e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto.

Contattare Eloflex

In caso di domande, assistenza o informazioni su richiami di prodotti o avvisi di sicurezza, contattare il centro assistenza o la concessionaria locale. Se necessario, il numero di serie del prodotto è riportato su un adesivo situato sul lato inferiore del telaio.

